

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

⚠ 危険 併用してはいけない方

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、
身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

- ❌ ☐ ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ☐ 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ☐ 心電計などの装着型医用電気機器

上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。

⚠ 警告 使用してはいけない方

次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ❌ ☐ 医師にEMS機器の使用を禁じられている方
- ☐ 静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
- ☐ 使用部位にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- ☐ 使用部位に傷などの異常がある方(やけど、水疱、病変、
切開、創傷、活動性皮膚疾患または皮膚感染など)
- ☐ 妊娠中の方、出産直後の方
- ☐ 小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解
できない方
- ☐ 飲酒している方
- ☐ 発熱(38℃以上)している方

⚠ 警告 使用してはいけない部位

次のような部位には使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ❌ ☐ 首(頸部付近)、喉、頭部、顔
- ☐ 骨(背骨、ひじ・ひざなどの関節部位)
- ☐ 取扱説明書およびメディカルプロ トレーニング
ブックで貼り位置を指定していない部位
- ☐ 傷口などの粘膜部位
- ☐ 当日、脱毛処理をした部位
- ☐ 整形手術をした部位
- ☐ 金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである
部位(人工関節含む)

⚠ 危険 本品を近づけてはいけない機器

- ❌ ☐ 本品を、ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を装着した方の装着部位に近づけないでください(本品と装着部位は22cm以上離してください)。

- ❗ ☐ 同じ施設内で医療機器を使用されている場合は、
医療機器の取扱説明書に従って、本品と医療機器を
適切な距離以上離して使用してください。

⚠ 警告 医師、専門家にご相談いただきたい方

次のような方は必ず医師、専門家にご相談のうえ使用してください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ❗ ☐ 悪性腫瘍のある方
- ☐ 心臓疾患のある方、またはその疑いがある方
(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
- ☐ 心臓疾患の既往歴がある方
- ☐ 温度感覚喪失が認められる方
- ☐ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚
障害のある方
- ☐ 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- ☐ 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ☐ 脊椎ならびに脚部の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼(とう)痛性)疾患のある方
- ☐ 血圧に異常がある方
- ☐ 使用部位やその周辺をけがしている方、または手術
したことがある方
- ☐ 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活
ができない方
- ☐ 体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- ☐ 使用部位に知覚障害や異常(感染症、皮膚炎や傷など)
のある方
- ☐ 血行障害のある方
- ☐ 使用部位やその周辺に刺青(タトゥー)を入れている方
- ☐ アレルギー体質の方
- ☐ 安静を必要とする方
- ☐ 身体に異常を感じている方
- ☐ 専用ジェルパッドが肌に合わない方
- ☐ 医師に運動を禁じられている方
- ☐ 長期間、運動していない方医療機関で治療中の方
- ☐ 使用に不安がある方

- 誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

危険 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示します。

注意 誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害(家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害)の発生が想定される」内容を示します。

警告 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

- 守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

禁止 注意を促す内容があることを告げるものです。

禁止 禁止の行為であることを告げるものです。







強制 行為の強制や指示を告げるものです。

免責事項

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

使用する際の警告

- ・同じチャンネルケーブルで、同一の線で心臓を前後または左右にまたぐ通電方法はしないでください。
- ・胸に電極をつける場合は、中心から左右2cmずつ、4cm以上間隔をあけるようにしてください。
- ・心臓に障害のある人が使用する際は、医師または専門家に相談をしてください

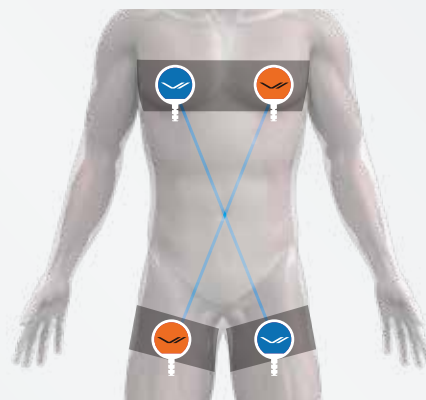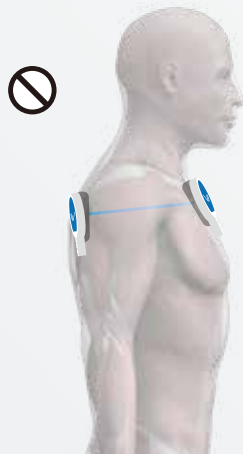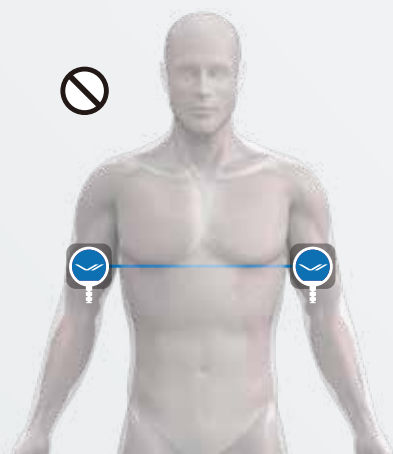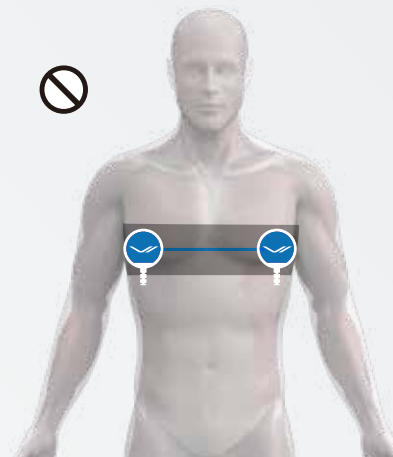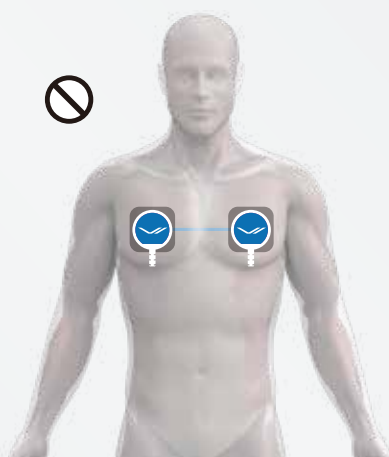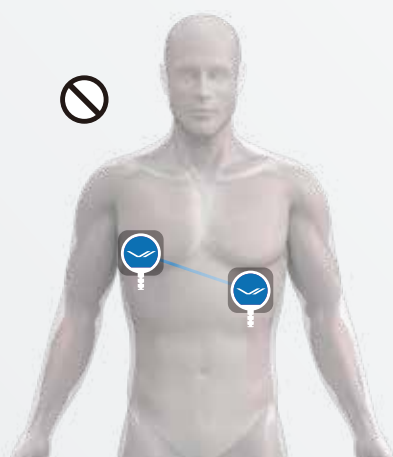

本品は電気刺激によって、全身の筋肉トレーニングを目的としています(医療機器ではありません)。